

# Краткое справочное руководство

Набор реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2 (метод коллоидного золота)

# Sinocare®


## 1. Подготовка



Зонд с ватным тампоном для взятия мазка из носоглотки



Пробирка с буфером

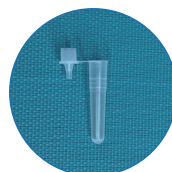

Пробирка для разведения биологического образца



Лунка для образца  
Тест-полоска

## 2. Этапы работы



**1** Во время работы используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, хирургические маски, лабораторные халаты и защитные очки.




**2** Достаньте тест-полоску из пакета из фольги и приготовьтесь к тесту.




**3** Добавьте 10 капель буфера вертикально в пробирку для разведения биологического образца.




**4.1** Извлеките зонд с ватным тампоном из упаковки. Примечание: Не следует прикасаться к наконечнику (тампону) зонда и не следует извлекать зонд из упаковки до взятия пробы.

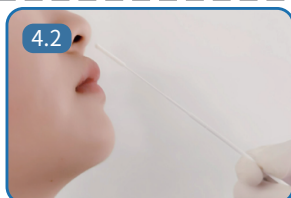

**4.2** Наклоните голову пациента назад примерно на 70°.

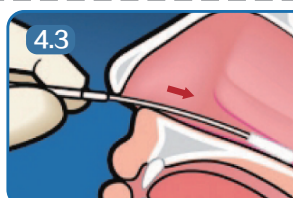

**4.3** Вставьте зонд с ватным тампоном в носоглотку (см. Рис. 4.3). Проведите зондом с ватным тампоном по внутренней стенке каждой ноздри не менее 5 раз. Сбор образца должен занимать примерно 15 секунд.

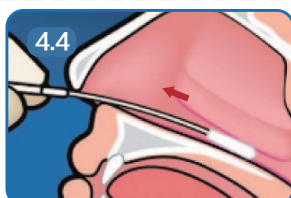

**4.4** Медленно извлеките тампон.



**5** Вставьте зонд с ватным тампоном в раствор в пробирку для разведения биологического образца, вращая его вблизи к внутренней стенке пробирки в течение 10 раз, а затем подержите зонд с ватным тампоном в растворе в течение 1 минуты, чтобы максимально экстрагировать образец.



**6** Для получения максимального количества жидкости из тампона, извлеките зонд, одновременно сжимая его наконечник (тампон) стенками пробирки.



**7** Закройте пробирку крышкой и осторожно встряхните ее, чтобы остаточная жидкость на стенке пробирки полностью смешалась с жидкостью в пробирке.




**8** Поместите тест-полоску горизонтально на чистый и плоский стол. Переверните пробирку для разведения биологического образца так, чтобы крышка пробирки оказалась внизу и, держа пробирку вертикально, добавьте 2 капли (около  $80 \pm 5$  мкл) в лунку для образца тест-полоски.



**9** После выполнения теста вымойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство для рук. Примечание: использованные материалы для теста должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.

## 3. Интерпретация результатов

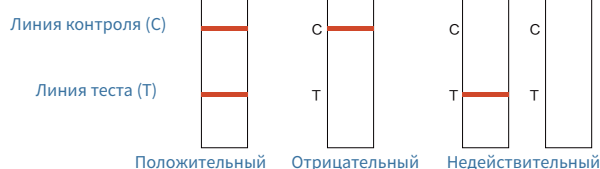

Подождите 15-20 минут и интерпретируйте результаты. Результаты недействительны, если они появились более чем через 20 минут.